

Ficha de Produto

Designação:

SoftSkin 10x10x0,3cm



Descrição Técnica:

Usar como protecção contra eventuais lesões de pele em pacientes com pouca mobilidade e pontos de pressão elevada entre os joelhos, próteses externas, saliências ósseas ou qualquer outra zona apropriada.

Modo de Utilização / Instruções:

1. Retirar o produto da embalagem.
2. Cortar o penso (se necessário) com a película protetora.
3. Retirar a película e aplicar qualquer um dos lados na zona a proteger.
4. Cobrir com gaze seca e fixar com adesivo, malha tubular ou qualquer outro sistema indicado pelo profissional.
5. Para aliviar a pressão em feridas abertas, cortar uma janela no SoftSkin, de tamanho ligeiramente superior ao contorno da ferida, e colocar por cima do penso inicial. A fim de evitar danos nos tecidos circundantes.

Refª: 10553

Modelo: 10x10x0.3cm

Marca: SoftSkin

Tipo produto: Protecção Anti-escar

Fim a que se Destina:

O produto destina-se a completar programas de cuidados de saúde, recomenda-se a inspeção regular da pele no local.

Instruções Limpeza:

Pode ser lavado com água e sabão suave, enxaguado e completamente seco, ou esterilizado com óxido de etileno, para voltar a usar no mesmo doente.

Contra Indicações:

Se houver reacção alérgica, interromper o tratamento imediatamente e consultar o médico.
Não utilizar como penso inicial.
Não aplicar sobre o nariz ou boca.
Não esterilizar em autoclave.

Garantia: Dentro do Prazo de Validade Contra Defeito Fabrico

Grau de Risco : I - Não Esteril

Código do Organismo Notificado : N/A

Classificação : Não Activos

Modo de Esterilização : N/A

Fabricante : Dekumed (Alemanha)

Mandatário : N/A



Centro Empresarial Sintra - Estoril VI, Edifício T1
Estrada de Albarraque - Linho
2710-297 Sintra
Tel: +351 21 924 82 90 Fax: +351 21 924 49 99
info@jmv.com.pt
www.jmv.com.pt

Visite-nos no nosso site www.jmv.com.pt